

Simplemente se ajusta y funciona



F&P SIMPLUS MASCARILLA FACIAL COMPLETA

Las mascarillas F&P Simplus se han diseñado teniendo en cuenta la comodidad, el ajuste y la facilidad de uso.

F&P Simplus es el resultado de un gran esfuerzo de investigación y desarrollo, de muchos prototipos y de miles de horas de diseño. Hemos consultado con pacientes, proveedores de equipos y médicos de todo el mundo para desarrollar una máscara que **simplemente se ajusta y funciona.**

Simplus F&P incorpora tres componentes clave, la vaina RollFit™, el arnés Ergoform™ e Easy Frame, todos diseñados para trabajar en armonía. Juntos, estos componentes ofrecen la comodidad, el sellado y el uso sencillo por los que son famosas las mascarillas de Fisher & Paykel Healthcare.

Arnés ErgoForm
Ganchos Easy-Clip +
Correa ajustable para la coronilla +
Paneles elásticos y no elásticos +
Tiras VELCRO® integradas +

Vaina RollFit
Paneles de estabilidad integrados +
Difusor avanzado de aire +

Easy Frame
Conexión al marco Easy-Clip +
Junta de tipo rótula esférica +



1. Vaina RollFit

Como sugiere su nombre, la vaina de una pieza “rueda” hacia atrás y hacia delante en el puente de la nariz para ajustarse automáticamente. De esta forma, la **tecnología RollFit** reduce al mínimo la presión en el puente de la nariz.

La **vaina RollFit** incorpora **paneles de estabilidad integrados** para mejorar el sellado, mientras que el **difusor avanzado de aire** reduce al mínimo el ruido y las corrientes de aire.

2. Arnés ErgoForm

Este arnés transpirable y ergonómico se coloca solo en la parte superior-posterior de la cabeza para que ésta tenga la máxima libertad de movimientos (lateral y verticalmente).

Incorpora paneles **elásticos y no elásticos** en el arnés **ErgoForm**, diseñado para conservar su forma pero que puede estirarse donde haga falta, y que proporcionan una facilidad de uso y un rendimiento óptimos.

Las tiras de VELCRO®* con **ganchos Easy-Clip** permiten poner y quitar rápidamente la mascarilla.

La **correa ajustable para la coronilla** mejora la estabilidad de la mascarilla.

3. Easy Frame

Este marco de bajo perfil es estable, duradero y pequeño y garantiza una visión libre de obstáculos.

Un solo marco que se adapta a los tres tamaños de vaina y dispone del sistema de conexión al marco Easy-Clip, que facilita el montaje después de la limpieza.

La **junta de tipo rótula esférica** gira para ofrecer libertad de movimientos, al tiempo que reduce los tirones del tubo de CPAP.